

R-Motion®

**RECIPROICATION
REDEFINED**



SEGURO. FÁCIL. MÍNIMAMENTE INVASIVO.

www.fkg.ch/r-motion

Instrumentos Reciprocantes FÁCILES DE USAR, CONSERVADORES y que inspiran CONFIANZA

MÁXIMA FLEXIBILIDAD

gracias al proceso de tratamiento térmico exclusivo al que se someten los instrumentos R-Motion®.

MÁXIMA RESISTENCIA

a la fatiga cíclica, mejorando la seguridad del paciente.

MÁXIMO CONTROL

para un avance suave y sin riesgo, gracias al diseño y al proceso de tratamiento térmico exclusivos.

Gama de productos R-Motion®:

LIMA DE PREENSANCHAMIENTO

R-Motion Glider



LIMAS DE CONFORMACIÓN

R-Motion 25



R-Motion 30



R-Motion 40



R-Motion 50



SIMPLICIDAD DE USO Y AHORRO DE TIEMPO*

un único instrumento reciprocante para cualquier conformación.

MÍNIMAMENTE INVASIVO

gracias a las bajas conicidad del sistema reciprocante, que respeta mejor** la anatomía de los conductos.

GLIDE PATH ÚNICO

instrumento de preensanchamiento, totalmente integrado al concepto R-Motion®.

SECUENCIA PARA LA MAYORÍA DE CASOS

PREENSANCHAMIENTO

R-Motion Glider



CONFORMACIÓN

R-Motion 25



R-Motion 30



0***

* En comparación con sistemas de limas múltiples.


** En comparación con sistemas reciprocantes convencionales de NiTi.

*** Seleccione el instrumento de conformación en función de su enfoque terapéutico.

Tratamiento SEGURO y CONTROLADO


Máxima Flexibilidad

Gracias a su exclusivo proceso de tratamiento térmico, reconocible por el color azul del instrumento, R-Motion® ofrece una mayor flexibilidad y permite a los profesionales tratar con éxito los diversos sistemas radiculares.

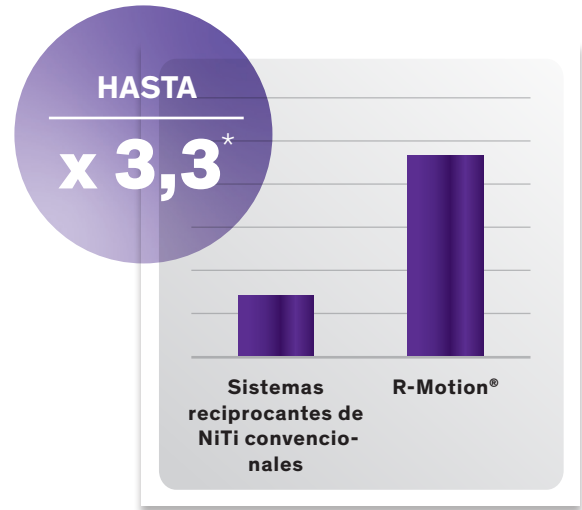


Mayor Resistencia a la Fatiga Cíclica

Los instrumentos R-Motion® proporcionan una mayor resistencia a la fatiga cíclica gracias al exclusivo tratamiento térmico al que se someten. Como es sabido, a mayor resistencia a la fatiga cíclica, menor riesgo de fractura del instrumento y mayor seguridad del paciente.

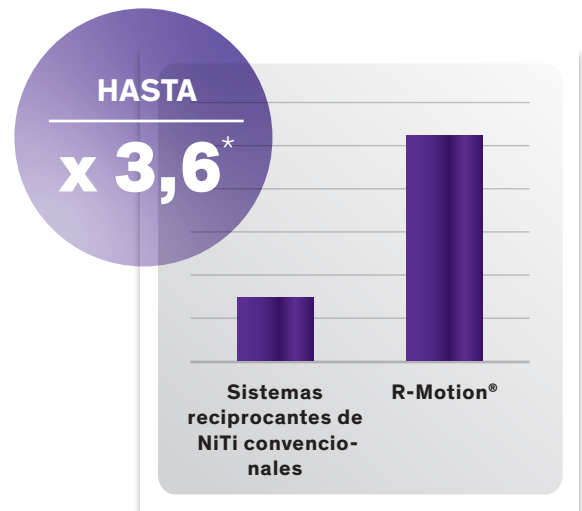

Menor Efecto de Atornillamiento

R-Motion® se ha diseñado para reducir el efecto de atornillamiento, lo que ofrece al profesional un mayor control y seguridad durante el tratamiento endodóntico.

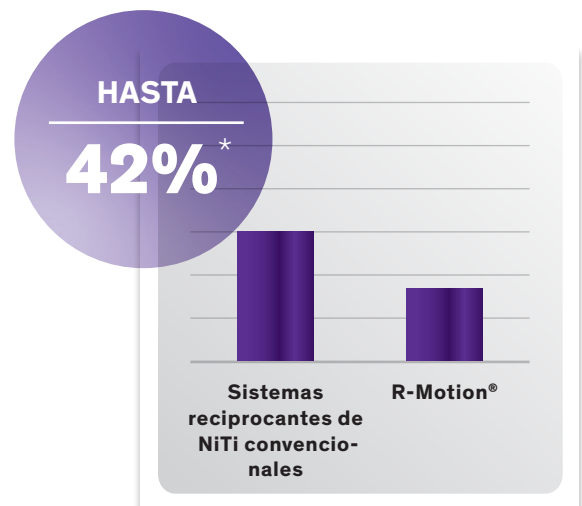



* Según resultados de laboratorios internos comparados con instrumentos equivalentes de la competencia.

MÍNIMAMENTE INVASIVO Gracias a una Combinación de Tecnologías de Eficacia Probada

Respetar Mejor la Anatomía del Conducto

La mayor flexibilidad de R-Motion® y su diseño mejoran la capacidad de centrado y respetan mejor la anatomía del conducto.

El núcleo interno de los instrumentos R-Motion® es más fino y, por tanto, menos invasivo que las limas de la competencia, reduciendo, de esa forma, el riesgo de eliminar exceso de dentina, así como el impacto en las zonas no infectadas.

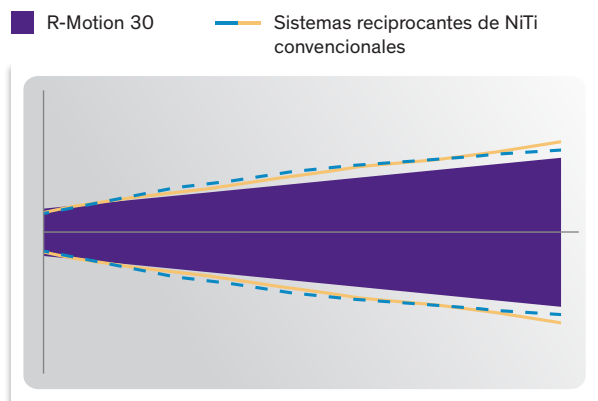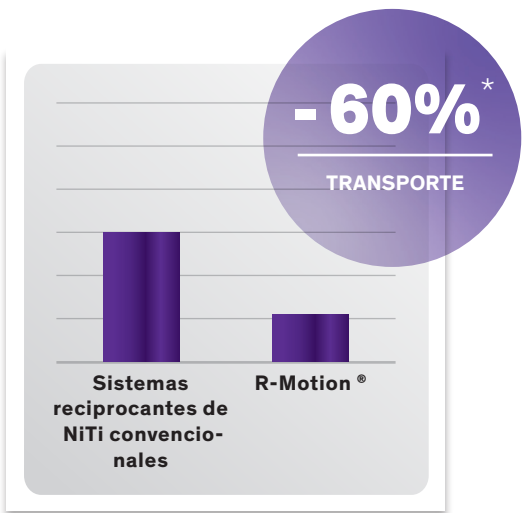


Eficiencia de Corte Mejorada

La sección transversal triangular redondeada con bordes afilados y la nueva y optimizada punta de la lima** son una combinación perfecta que mejora la eficiencia de corte hasta el ápice, sin afectar a la dentina.



Menor Estrés sobre la Dentina

El exclusivo diseño de R-Motion® y su núcleo de menor tamaño reducen significativamente el estrés sobre la dentina al tratar el conducto radicular.

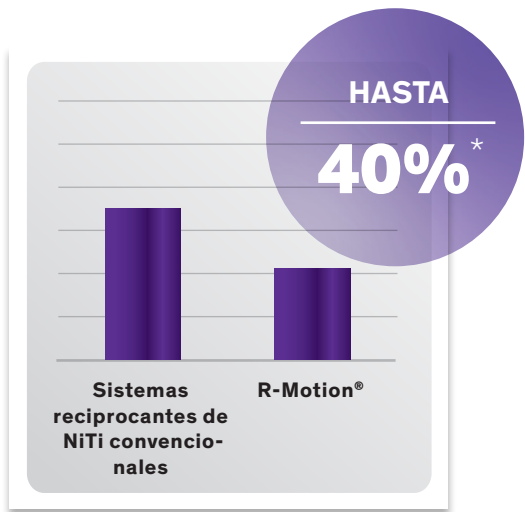




* Según resultados de laboratorios internos comparados con instrumentos equivalentes de la competencia.

** Patente en trámite.

Referencias de los Productos




INSTRUMENTO RECIPROCANTE DE PREENSANCHAMIENTO

R-Motion Glider




	3×	21mm	S1.7B0.00.0GM.FK
15/.03			
	3×	25mm	S1.7B0.00.0GN.FK
	3×	31mm	S1.7B0.00.0GO.FK

INSTRUMENTO RECIPROCANTE DE CONFORMACIÓN




R-Motion 25

	3×	21mm	S1.7B0.00.0FR.FK
25/.06			
	3×	25mm	S1.7B0.00.0FS.FK
	3×	31mm	S1.7B0.00.0FT.FK




R-Motion 30

	3×	21mm	S1.7B0.00.0FI.FK
30/.04			
	3×	25mm	S1.7B0.00.0FL.FK
	3×	31mm	S1.7B0.00.0FO.FK

R-Motion 40





	3×	21mm	S1.7B0.00.0FJ.FK
40/.04			
	3×	25mm	S1.7B0.00.0FM.FK
	3×	31mm	S1.7B0.00.0FP.FK

R-Motion 50

	3×	21mm	S1.7B0.00.0FK.FK
50/.04			
	3×	25mm	S1.7B0.00.0FN.FK
	3×	31mm	S1.7B0.00.0FQ.FK





PUNTAS DE PAPEL

Caja de 200 puntas de papel

	25/.06	08.610.06.025.BC
	30/.04	08.610.04.030.BC
	40/.04	08.610.04.040.BC
	50/.04	08.610.04.050.BC





GUTTA PERCHA

Caja de 60 Gutta Percha

	25/.06	08.600.06.025.RE
	30/.04	08.600.04.030.RE
	40/.04	08.600.04.040.RE
	50/.04	08.600.04.050.RE

TOTALFILL® BC POINTS™

Caja de 60 BC Points

	25/.06	08.650.06.025.RE
	30/.04	08.650.04.030.RE
	40/.04	08.650.04.040.RE
	50/.04	08.650.04.050.RE

TOTALFILL® BC SEALER™




Jeringa 2 g + 15 TotalFill BC Tips



08.650.00.007.XX

TOTALFILL® BC POINTS™ HIFLOW

Caja de 60 BC Points HiFlow

	30/.04	08.650.04.030.HF
	40/.04	08.650.04.040.HF
	50/.04	08.650.04.050.HF

TOTALFILL® BC SEALER™ HIFLOW

Jeringa de 1,5 g + 15 TotalFill BC Tips



08.650.00.008.XX

www.fkg.ch/r-motion

FKG Dentaire SA
Crêt-du-Loche 4
CH-2304 La Chaux-de-Fonds
Suiza
T +41 32 924 22 44

info@fkg.ch
www.fkg.ch

